

Instrukcja Obsługi EmunDo



SYNONIM NOWOCZESNEJ TERAPII PTT
EFEKT BAKTERIOBÓJCZY **BEZ ANTYBIOTYKÓW**

Jedno opakowanie EmunDo zawiera	strzykawka plastikowa, kaniula punkcyjna, kaniula aplikacyjna, fiolka RW, fiolka PG, zakrzywiona końcówka z tworzywa sztucznego
Proporcje mieszania	1 ml wody demineralizowanej RW + 1 mg zielonego infracyjaninu PG
Aplikacja EmunDo	nakładać EmunDo® na pełne kwadranty lub w obszarach co najmniej 3-4 zębów
Potrzebne końcówki	HS11020 Końcówka terapeutyczna z dużą płamką HS11033 + LL13046 nasadka bulwowa HS11033 + LL13047 nasadka standardowa
Trwałość	2 lata - w przypadku przechowywania w suchym miejscu, i zabezpieczeniu przed obciążeniami mechanicznymi Po otwarciu użyć w ciągu 6 godzin.
EmunDo® jest dopuszczone do stosowania wyłącznie z laserem FOX 810 nm (wyprodukowanym i rozpowszechnianym przez A.R.C. Laser).	



Usuń nasadkę z fiolek.

Wprowadź kaniulę punkcyjną do fiołki (RW) i pobierz tylko 1 ml wody do płukania.

Nie używaj pełnej zawartości.



MIX &
SHAKE
WELL

Wprowadź 1 ml RW do proszku PG i dokładnie wymieszaj.

Otrzymana ciecz musi być zupełną zawiesiną. Użyj plastikowej strzykawki z kaniulą punkcyjną, aby pobrać mieszaninę.



APPLY
DIRECT

Teraz EmunDo® jest gotowe do zastosowania na wskazany kwadrant.

1. Odessać ślinę
2. Zaaplikować EmunDo na kwadrant (oddzielnie policzkowo / językowo) lub grupowo po 3-4 zęby.

Używać plastikowej strzykawki z kaniulą aplikacyjną z tęym końcem

1) Naświetlanie dziąseł poprzecznie
od strony policzkowej i językowej



2) Aktywacja światłowodem bulwiastym
od strony policzkowej i językowej




3) Deepitalizacja
od strony policzkowej i językowej



Zęby przednie każdy krok przez 5s

Zęby przedtrzonowe każdy krok przez 10s

Zęby trzonowe każdy krok przez 10s

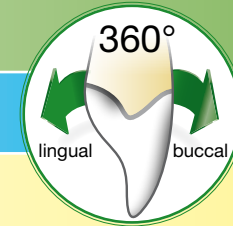

Wymagana końcówka
Zachowaj odległość 15 mm i
naświetlaj przez dziąsło.
Naświetlać punkt po punkcie

Naświetlać należy wszystkie zaci-
nione obszary wewnątrz kieszonek.
Wykonywać ruch ciągły: okrężny
w kierunku dokerzeniowym


Usuń tkankę zmienioną zapalnie
i biofilm.




Laser FOX
i rekomendowane akcesoria dla
śróddziąsłowej terapii fototermicznej (PTT)



HS11020 +
LL13063

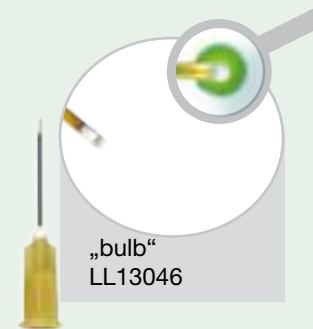

„bulb“
LL13046

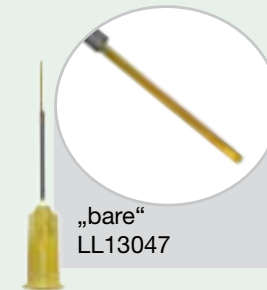

„bare“
LL13047



HS11033

Koncept EmunDo®

Kiedy?	Kto?	Zabieg	
przed	Dentysta	Diagnoza choroby przyzębia	FAZA POCZĄTKOWA
	Higienistka dentystyczna	Płukanie za pomocą Chlorhexamed CHX 2% - redukcja bakterii	
	Higienistka dentystyczna	Test aMMP-8	
	Higienistka dentystyczna	Profesjonalne czyszczenie zębów	
	Dentysta	Instrukcje dotyczące higieny jamy ustnej	
Dzień 1 Leczenie początkowe	Higienistka dentystyczna	Płukanie za pomocą Chlorhexamed CHX 2% - redukcja bakterii	FAZA EMUNDO
	Higienistka dentystyczna	Odsysanie śliny / delikatne osuszenie powierzchni kieszonek dziąsłowych sterylnymi wacikami	
	Higienistka dentystyczna	Nakładanie barwnika EmunDo®	
	Higienistka dentystyczna	Śróddziąsłowa aktywacja (HS11020 - czarna końcówka)	
	Higienistka dentystyczna/Dentysta	Aktywacja światłowodem z główką bulwiastą (LL13046 - nasadka bulwiasta /LL13041 - światłowod bulwiasty)	
	Higienistka dentystyczna/Dentysta	Deepitalizacja (LL13047 - nasadka światłowodu standardowego/LL 13001 - światłowod standardowy)	
Dzień 4-7 Leczenie drugie	Higienistka dentystyczna	Płukanie za pomocą Chlorhexamed CHX 2% - redukcja bakterii	FAZA EMUNDO
	Higienistka dentystyczna/Dentysta	Zabieg EmunDo® obejmujący całą jamę ustną + usuwanie pozostałych złogów	
Dzień 14-16 Leczenie trzecie	Dentysta	Kontrola krwawienia	FAZA EMUNDO
	Higienistka dentystyczna/Dentysta	W razie konieczności uzupełniająca terapia EmunDo® (np. krwawienie, stan zapalny pozostałych kieszonek)	
Dzień 44-48	Dentysta	Kontrola stanu przyzębia	FAZA EMUNDO
		Ustalenie planu wizyt kontrolnych	
Dzień 140-150	Higienistka dentystyczna/Dentysta	Kontrola krwawienia	WYCOFANIE
Powtórzenie co 3 miesiące		W razie konieczności uzupełniająca terapia EmunDo® (np. krwawienie, stan zapalny pozostałych kieszonek)	

akcesoria

- okulary ochronne

FOX ma długość fali 810 nm i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla wzroku!

Najbardziej odpowiednie okulary mają oznaczenie: **AS01009**



- Końcówka terapeutyczna, duża plamka (leczenie krok 1)

standardowe akcesoria: HS11020 + LL13063


rozmiar plamki 5 x 15 mm przy odległości 15 mm



- nasadka bulwiasta (leczenie krok 2)

akcesoria standard: HS11018 + LL13041 + ZU01027

akcesoria expert: HS11033 + LL13046

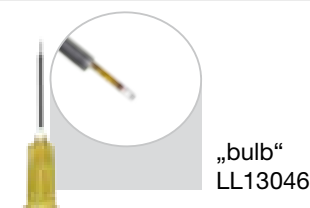

- nasadka standardowa (leczenie krok 3)

akcesoria standard: HS11018 + LL13001 + ZU01027

akcesoria expert: HS11033 + LL13047

